

AN 2022_32

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

Aktualizace softwaru přístroje LAURA version 2 – verze 1.16

LAURA version 2, Katalogové číslo: INS00063

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že poslední dostupná verze SW (1.16) pro přístroj LAURA version 2 obsahuje modifikované uživatelské rozhraní pro kontrolu kvality, kam byly přidány kontrolní moče Bio-Rad Liquicheck Urinalysis Control. Nově jsou výsledky QC pro Bio-Rad Liquicheck automaticky porovnávány s nastavenými cílovými hodnotami a přístroj sám vyhodnotí, zda je kontrola kvality vyhovující či nikoliv – výsledky jsou reportovány stejným způsobem jako u kontrolních močí URINORM.

Pro přepnutí kontroly kvality do režimu kontrolních močí Bio-Rad Liquicheck Urinalysis Control postupujte následovně: MENU → Kontrola kvality → Nastavení → poklepání na políčko MODE lze přepínat mezi typem kontrolního materiálu URINORM nebo BIORAD. Po vybrání módu BIORAD lze nastavit šarži a expiraci používaného kontrolního materiálu.

Pro zadávání cílových mezí pro Bio-Rad Liquicheck postupujte následujícím způsobem: MENU → Kontrola kvality → Nastavení → poklepáním na políčko MODE přepněte do režimu BIORAD → poklepáním na políčko PAD se zobrazí rozhraní pro zadávání cílových hodnot. Dostupné hodnoty pro negativní hladinu jsou označeny „N“, patologická hladina je označena „P“. Pro přiřazení cílových hodnot pro konkrétní hladinu označte požadované hodnoty – vybrané hodnoty jsou zbarveny modře, nevybrané hodnoty mají šedou barvu. Zadejte cílové hodnoty pro všechny požadované parametry. Nastavení potvrďte stisknutím ✓.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit.
S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Technical Product Management

V Brně, 13. 12. 2022

