

Diagnostické proužky pro analýzu moče

1



Vyjměte proužek z tuby.

2



Tubu se zbývajícími diagnostickými proužky ihned pečlivě uzavřete.

3



Namočte diagnostický proužek do vzorku moči tak, aby všechny diagnostické zóny byly ponořené (namočení 2 – 3 s).

4




Proužek vyjměte a přebytečnou moč odstraňte otřením hrany o okraj nádoby.

5



Zbývající přebytečnou moč odstraňte otřením hrany proužku o papírový ubrousek (neotírejte testovací zóny).

6

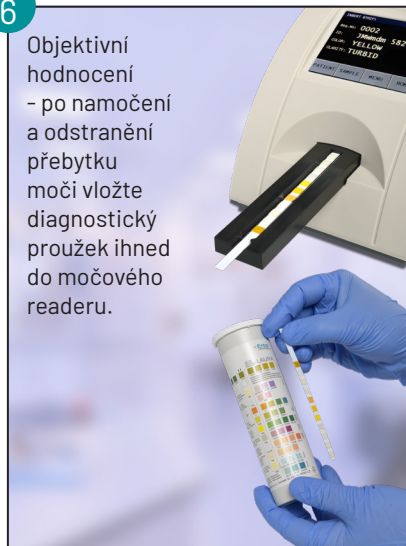

Objektivní hodnocení – po namočení a odstranění přebytku moči vložte diagnostický proužek ihned do močového readeru.

Vizuální hodnocení – po uplynutí předepsané reakční doby uvedené v návodu srovnajte výsledné zbarvení s barevnou srovnávací stupnicí na štítku.

Pokyny pro práci s diagnostickými proužky

- Pro analýzu použijte čerstvou, ideálně první ranní moč (střední proud), promíchejte.
- Proužky uchovávejte v originálních, dobře uzavřených obalech.
- Tuby s proužky skladujte na suchém a tmném místě při teplotě +2 až +30 °C (neskladujte v ledničce).
- Proužky nesmějí být vystaveny účinku vlhkosti, přímého slunečního světla, zvýšené teploty nebo chemických výparů.
- Při práci vyjměte z tuby jen tolik proužků, kolik je potřeba pro bezprostřední použití a tubu ihned pečlivě uzavřete.
- Nedotýkejte se indikačních zón na proužcích.

Erba
Mannheim



**RYCHLÝ PŘEHLED
ZDRAVÍ PACIENTA**

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 517 077 111
E-mail: diagnostics@erbamannheim.com
www.erbalachema.com



TOTAL SOLUTIONS FOR CLINICAL DIAGNOSTICS

PHAN20200707CZ

PHAN[®]

**DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY
PRO ANALÝZU MOČE**

Diagnostické proužky pro analýzu moče

[illegible][illegible]