

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

**Aktualizace cílových hodnot pro kontrolní moče Bio-Rad Liquichek
šarže: 87730–87760**

LAURA XL, Katalogové číslo: INS00065
Bio-Rad Liquichek Urinalysis Control, Katalogové číslo: 435

Vážený zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o aktualizaci cílových hodnot částic sedimentu v kontrolních močích Bio-Rad Liquichek pro automatický močový analyzátor LAURA XL. Nové cílové hodnoty byly stanoveny na základě našich dodatečných analýz a zpětné vazby z trhu pro následující šarže: 87730 (exp: 02/2023), 87740 (exp: 07/2023), 87750 (exp: 12/2023) and 87760 (exp: 06/2024). Aktualizované cílové hodnoty jsou shrnuty v následující tabulce:

Bio-Rad Liquichek – šarže 87730 (exp: 02/2023)		
Parametr	Level 1	Level 2
Červené krvinky (RBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	24–189 N/hpf (132–1053 N/ μ l)
Bílé krvinky (WBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	5–66 N/hpf (26–368 N/ μ l)
Bio-Rad Liquichek – šarže 87740 (exp: 07/2023)		
Parametr	Level 1	Level 2
Červené krvinky (RBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	20–199 N/hpf (105–1105 N/ μ l)
Bílé krvinky (WBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	5–85 N/hpf (26–474 N/ μ l)
Bio-Rad Liquichek – šarže 87750 (exp: 12/2023)		
Parametr	Level 1	Level 2
Červené krvinky (RBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	24–199 N/hpf (132–1105 N/ μ l)
Bílé krvinky (WBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	9–85 N/hpf (53–474 N/ μ l)
Bio-Rad Liquichek – šarže 87760 (exp: 06/2024)		
Parametr	Level 1	Level 2
Červené krvinky (RBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	14–199 N/hpf (79–1105 N/ μ l)
Bílé krvinky (WBC)	0–3 N/hpf (0–16 N/ μ l)	5–85 N/hpf (26–474 N/ μ l)

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technical Product Management
Brno, 11. 1. 2023



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-