

AN 2022\_31

## INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

**Aktualizace softwaru přístroje LAURA SMART – verze 3.1 Ma (2.31)**

**LAURA SMART, Katalogové číslo: INS00064**

Vážený zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že poslední dostupná verze SW – 3.1 Ma (2.30) pro přístroj LAURA SMART obsahuje modifikované uživatelské rozhraní pro kontrolu kvality (KONTROLA), kam byly přidány kontrolní moče Bio-Rad Liquicheck Urinalysis Control. Nově jsou výsledky QC pro Bio-Rad Liquicheck automaticky porovnávány s nastavenými cílovými hodnotami a přístroj sám vyhodnotí, zda je kontrola kvality vyhovující či nikoliv – výsledky jsou reportovány stejným způsobem jako u kontrolních močí URINORM.

Pro přepnutí kontroly kvality do režimu kontrolních močí Bio-Rad Liquicheck Urinalysis Control postupujte následovně: MENU → KONTROLA → ve spodní části obrazovky poklepáním přepnete mezi módy URINORM nebo BIORAD. Po vybrání kontrolních močí Bio-Rad lze nastavit poklepáním na políčko SETUP expiraci a šarži používaného kontrolního materiálu.

Zadávat cílových hodnot pro obě hladiny kontrolního materiálu je přístupné pouze v módu ADMIN (SPRÁVCE). Pro zadávání cílových hodnot pro Bio-Rad Liquicheck postupujte následujícím způsobem: MENU → KONTROLA → ve spodní části obrazovky poklepáním přepnete mezi módy URINORM nebo BIORAD → SETUP → poklepáním na políčko PAD se zobrazí rozhraní pro zadávání cílových hodnot. Dostupné hodnoty pro negativní hladinu jsou označeny „N“, patologická hladina je označena „P“. Pro přiřazení cílových hodnot pro konkrétní hladinu označte požadované hodnoty. Vybrané hodnoty jsou zbarveny modře, nevybrané hodnoty mají šedou barvu. Zadejte cílové hodnoty pro všechny požadované parametry. Nastavení potvrďte stisknutím OK.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Technical Product Management

V Brně, 07. 02. 2023

  
**Erba Lachema s.r.o.**

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno

DIČ: CZ26918846 -7-