

AN 2023_05

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

**Aktualizace cílových hodnot pro kontrolní moče Bio-Rad Liquichek
šarže: 87740 a 87750**

LAURA XL, Katalogové číslo: INS00065
Bio-Rad Liquichek Urinalysis Control, Katalogové číslo: 435

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vás informovali o aktualizaci cílových hodnot pro urobilinogen a proteiny v kontrolních močích Bio-Rad Liquichek pro automatický močový analyzátor LAURA XL v kombinaci s diagnostickými proužky DEKAPHAN AUTO. Nové cílové hodnoty byly stanoveny na základě našich dodatečných analýz a zpětné vazby z trhu pro následující šarže: 87740 (exp: 07/2023) a 87750 (exp: 12/2023).

Aktualizované cílové hodnoty jsou shrnuty v následující tabulce:

Bio-Rad Liquichek Urinalysis Control, šarže 87740 (exp: 07/2023)		
Analyt	Level 1 – 87741	Level 2 – 87742
Bílkoviny	negativní	30–500 mg/dl (0.3–5 g/l) (1+ - 3+)
Urobilinogen	normální	3–12 mg/dl (51–203 µmol/l) (2+ - 4+)

Bio-Rad Liquichek Urinalysis Control, šarže 87750 (exp: 12/2023)		
Analyt	Level 1 – 87751	Level 2 – 87752
Bílkoviny	negativní	30–500 mg/dl (0.3–5 g/l) (1+ - 3+)
Urobilinogen	normální	3–12 mg/dl (51–203 µmol/l) (2+ - 4+)

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technical Product Management
Brno, 14. 02. 2023

