

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

42_2023_SW bug in Laura XL SW v.1.2.3.31

Vážený zákazníku,

Dovolujeme si Vás informovat, že v nové verzi software 1.2.3.31 pro přístroj Laura XL byla nalezena softwarová chyba. Tato chyba se projevuje tak, že není možné provést Čistící proceduru.

Pro odstranění tohoto problému Vám radíme vypnout zaškrtnutí políčka před automatickým čištěním přístroje uživatelem s právy ADMIN.

Tato chyba bude odstraněna v další verzi Softwaru. Všechny podrobnosti jsou k dispozici v aktualizované verzi Technické poznámky pro updatovaný software v kapitole o známých chybách – TN-2023-013_3.

Aplikovatelné pro:

INSTRUMENT:

Laura XL

cat.no. INS00065

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technical product management



Brno 23. 01. 2024

Ref.No. AN_42_2023