

## INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

10\_2024\_Medica Corporation – elektrody (shelf life/onboard lifetime)

Vážený zákazníku,

Rádi bychom Vám poskytli jasné vysvětlení “data expirace”/“data nainstalováno do” a “onboard lifetime” elektrod vyrobených firmou Medica Corporation.

“Datum expirace”/“datum nainstalováno do” na obalu označuje dobu životnosti výrobku. “Onboard lifetime” začíná datem instalace, a to v případě, že je elektroda nainstalována v jakémkoliv časovém úseku její životnosti (shelf-life).

Například:

- 1.) V případě, že je “datum expirace”/“datum nainstalováno do” 1.5.2024, ale elektroda byla nainstalována do přístroje již v září 2023, šestiměsíční lhůta začala již v září 2023.
- 2.) V případě, že je “datum expirace”/“datum nainstalováno do” 1.5.2024 a elektroda byla do přístroje nainstalována 30.4.2024, šestiměsíční lhůta začíná běžet opět datem instalace (v tomto případě tedy 30.4.2024).

Výrobky, kterých se to týká:

Katalogové číslo	Registrační číslo	Název produktu	Shelf Life	Onboard lifetime
5201	51000144	ISE NA ELECTRODE FOR ERBA XL	1 rok	6 měsíců/10000 vzorků
5202	51000145	ISE K ELECTRODE FOR ERBA XL	1 rok	6 měsíců/10000 vzorků
5204	51001521	ISE REFERENCE ELECTRODE FOR ERBA XL 113952	1 rok	6 měsíců/10000 vzorků
5205	51001519	ISE LI ELECTRODE FOR ERBA XL	1 rok	6 měsíců/10000 vzorků
5207	51000143	ISE CL ELECTRODE FOR ERBA XL	1 rok	6 měsíců/10000 vzorků

V případě dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.  
Technical product management



**Erba Lachema s.r.o.**  
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno  
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 17.05.2024

Ref. No.AN\_10\_2024