

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

34_2024_ Re-atestace kalibrátorů a kontrolního materiálu pro CK-MB

Vážení zákazníci,

chtěli bychom vás informovat, že došlo ke **změně cílových hodnot** kalibrátorů a kontrol pro metodu CK-MB u všech šarží uvedených níže.

Hodnoty byly změněny na základě verifikace návaznosti kalibrátoru s referenční metodou IFCC pro stanovení CK-MB.

Nové cílové hodnoty pro šarže kalibrátoru XL MULTICAL:

XL MULTICAL		CK-MB	
šarže	expirace	U/L	μkat/L
2310071	2025-04	482	8,03
2310072	2025-04	482	8,03
2404135	2026-01	460	7,67
2405057	2026-01	460	7,67
2405058	2026-01	460	7,67
2407121	2026-03	434	7,23
2409055	2026-03	434	7,23

Nové cílové hodnoty pro kontroly ERBA NORM a ERBA PATH:

Kontrolní materiál			CK-MB					
Název	šarže	expirace	U/L			μkat/L		
			hodnota	interval	SD	hodnota	interval	SD
ERBA NORM	2302119 A,B	2025-12	38,2	28,6-47,8	3,2	0,64	0,49-0,79	0,05
ERBA NORM	2302121 A,B,C,D,E	2025-12	38,2	28,6-47,8	3,2	0,64	0,49-0,79	0,05
ERBA NORM	2310172 A,B	2026-06	37,3	28,0-46,6	3,1	0,62	0,47-0,77	0,05
ERBA PATH	2302120 A,B	2025-12	85,8	64,2-107,4	7,2	1,43	1,07-1,79	0,12
ERBA PATH	2302122 A,C	2025-12	85,8	64,2-107,4	7,2	1,43	1,07-1,79	0,12
ERBA PATH	2310173 A,B	2026-07	77,5	58,0-97,0	6,5	1,29	0,96-1,62	0,11

Supplier Quality Engineer
Martin Slovák

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat
MVDr. Ludmila Lukeszová: L.Lukeszova@erba.com

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

Erba Lachema s.r.o.



S pozdravem

Erba Lachema s.r.o.
Aplikační podpora

V Brně 4. 11. 2024

Ref.No.AN_34_2024



Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika

IČ 269 18 846, DIČ CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 45458

Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erba.com, www.eralachema.com