



## INDOXYLtest

kat. č.: 10010254

Detekční proužek INDOXYLtest je určen pro rychlou detekci acetáttesterázové aktivity *M. catarrhalis*, *Campylobacter* sp. apod.. Principem testu je hydrolýza účinného substrátu, tj. 3 - indoxyl acetátu na leuko formu indiga. Volné indoxylové skupiny reagují za přítomnosti kyslíku na chromogenní formu indiga. Modré zbarvení diagnostické zóny je považováno za pozitivní průkaz acetáttesterázové aktivity daného mikroorganismu.


### Výhody soupravy:

- použití testu bez nutnosti dalších činidel
- snadná manipulace
- rychlost provedení (výsledek do 5 min.)
- praktická velikost balení
- expirace 12 měsíců

### Souprava obsahuje:

- 50 detekčních proužků
- návod na použití

### Interpretace reakcí:

	INDOXYLtest
⊕	
⊖	