



OFtest

kat. č.: 10010256

Souprava OFtest je určena pro rychlé rozlišení fermentativního a oxidativního metabolismu glukózy. Jednoznačné rozlišení fermentujících a nefermentujících gramnegativních tyčků je základem pro správný výběr soupravy ENTEROtest 16, 24 nebo NEFERMtest 24.

OFtest je umístěn v odlamovacích jamkách speciální mikrotitrační destičky, což umožňuje provedení přesně potřebného počtu stanovení. Princip reakce je založen na modifikovaném Hugh Leifsonově mediu. Výsledek odečítaný již po 2-4 hodinách zkrátí dobu identifikace ve srovnání s klasickou metodou o jeden den.

Výhody soupravy:

- možnost oddělení pouze potřebného počtu testů
- použití testu bez nutnosti dalších činidel
- snadná manipulace
- rychlost provedení (výsledek během 2-4 hodin)
- ekonomičnost
- expirace 24 měsíců

Souprava obsahuje:

- odlamovací mikrotitrační destičku se sušidlem, 3 ks (celkový počet stanovení až 288/bal.)
- návod na použití
- 3 PE sáčky pro inkubaci
- sáček na uložení nepotřebované destičky

Interpretace reakcí:

	OFtest
+	žlutá
-	zelená