

## Zestaw bezodczynnikowy



## CANDIDAtest 21

### Zestaw do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych

- 21 reakcji biochemicznych
- identyfikacja 34 gatunków grzybów drożdżopodobnych
- zestaw bezodczynnikowy
- komfortowy tryb oceny wyników za pomocą programu TNW
- przechowywanie w temp. pokojowej 15–25°C

### Zestaw zawiera:

- 5 płytek do mikromiareczkowania, do identyfikacji 20 szczepów
- 20 probówek zawierających nośnik zawiesiny
- folie samoprzylepne do inkubacji, 20szt.
- druki do wpisywania wyników
- torebkę specjalnie przeznaczoną do ułożenia niezużytej reszty płytki
- pokrywę z nadrukiem

# CANDIDAtest 21

Barevná škála  
Farebná stupnica  
Colour Scale  
Цветная шкала  
Porównawcza skala barw  
Színskála  
Farbskala  
Escala de colores




REF 50003502

## MIKRO-LA-TEST®

1		H	G	F	E	D	C	B	A
		NGA	$\alpha$ -GLU	$\beta$ -GLU	ONC	GENA	GLU	GAL	MALA
	⊕								
2		H	G	F	E	D	C	B	A
		$\alpha$ -GAL	PHE	URE	UCO	RHA	INO	TRE	LAC
	⊕								
3		H	G	F	E	D	C	B	A
		PRO	PGUR	MEL	ACO	XYL	CEL	SUC	RAF
	⊕								
		H	G	F	E	D	C	B	A
		NGA	$\alpha$ -GLU	$\beta$ -GLU	ONC	GENA	GLU	GAL	MALA
	⊖								

	H	G	F	E	D	C	B	A
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

## CANDIDAtest 21

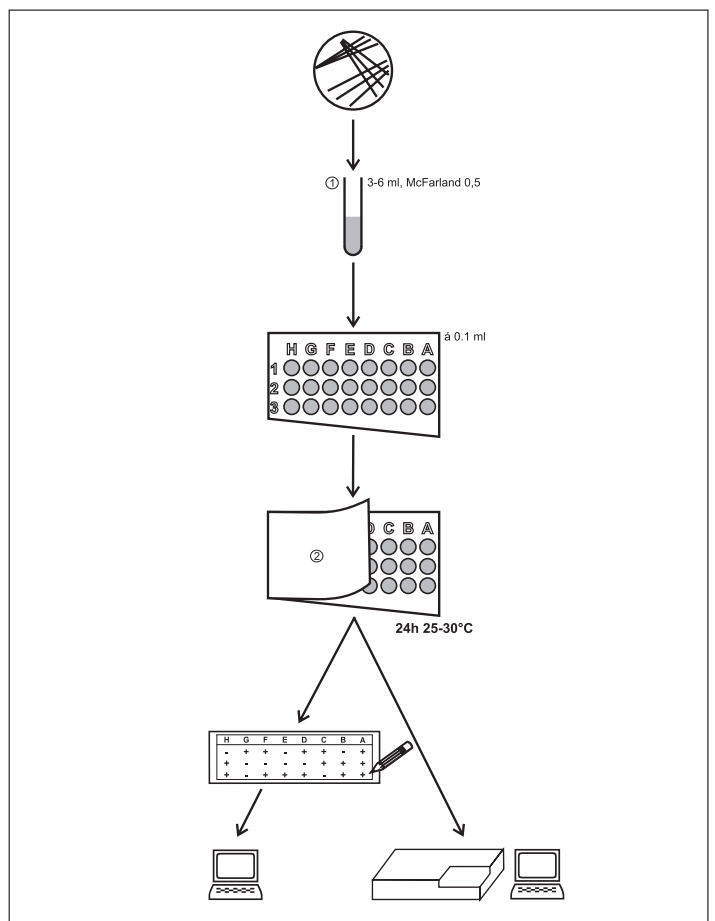

① = Suspenzní médium - Suspenzné médium - Suspension medium - Суспензионная среда - Pożywka dla zawiesin - Szuszpenziós közeg/Suspensionsmedium/Medio de suspensikn  
② = Přelepení inkubační fólií - prelepenie inkubačnou fóliou - sealing with plate sealer - переклейка инкубационной пленкой - Zaklejenie folią do inkubacji - Fedtje le a csikokat a fedővel.